

DUAL İNKÜBATÖR



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Kod: ZDL-100

Uzun süreli biyolojik indikatörler için inkübatör.

- Boyutlar: 15 x 13 x 9 cm (genişlik x uzunluk x yükseklik)
- Ağırlık: 1,7 kg
- Krom kaplama
- Kuluçka için 29 metal yuva (0,9 cm çap, 3,0 cm derinlik)
- İnkübasyon için 4 metal yuva (1,3 cm çap, 3,0 cm derinlik)
- 1 ampul kesici.
- Dijital gösterge
- Otomatik zamanlayıcı

Alarm

Kullanım

- Cihazı prize takın.
- düğmesine basarak kullanmak istediğiniz modu seçin.
- Modu seçtikten sonra zamanlayıcı otomatik olarak başlayacak ve cihaz gerekli sıcaklığa kadar ısınacaktır.
- Biyolojik indikatör ampulünü ampul kırıcı yardımıyla kırın ve inkübasyon için biyolojik indikatörü uygun yuvaya yerleştirin.
- İnkübasyon süresi bittiğinde alarm çalar. Alarmı kapatmak için "reset" butonuna basın 6-Kuluçka süresi sonunda sonuçları alacaksınız.
- Modu değiştirmek için; "Sıfırla" düğmesine bastıktan sonra kullanmak istediğiniz modu seçin.

- MOD 1: 37 ± 2 °C – 48 saat (Etilen Oksit)
- MOD 2: 57 ± 2 °C – 24 saat (Buhar)
- MOD 3: 60 ± 2 °C – 24 saat (Hidrojen Peroksit)

Uyarı

- Cihazın içine herhangi bir sıvı dökmeyin.
- Cihazı herhangi bir sıvıya batırmayın.
- Cihaz sadece iç mekanda kullanım içindir.
- Cihazı temizlemeden önce güç kablosunu prizden çekin.
- Cihaz temizliği için aşındırıcı veya aşındırıcı temizleyiciler veya dezenfektanlar kullanmayınız.
- Cihazın uygun bir güce bağlı olduğundan emin olun.