

## ETİLEN OKSİT AMPULU OTOMATİK KIRMA AKTİVATÖRÜ



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ZEISS otomatik lamba aktivatörü, gaz difüzyon tekniği ile çalışan etilen oksit sterilizatörlerinde kullanılan gaz lambasının el değmeden otomatik olarak aktif hale gelmesini sağlar. Güç tuşuna baş. Güç düğmesine bastıktan sonra kontrol düğmesine basarak cihazın şarj durumunu kontrol edin. Cihazın tamamen boşalmadığından emin olun. Cihazın kontrol butonuna basarak led ışıklarını takip edin. Sarı led ışık yandığında cihazı 6 saat şarjda bırakın. Şarj dolduğunda, led ışık yeşil olacaktır. Kırmızı LED lamba, pilin tamamen bittiğini gösterir. Pilin bitmesi pil ömrünü kısaltır. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir kullanım için cihazın belirtilen standartlara uygun kullanılması tavsiye edilir.

KODE	ÜRÜN ADI	BOYUT (mm)
ZEO-ACT	ETİLEN OKSİT AMPULU OTOMATİK KIRMA AKTİVATÖRÜ	185x60x160mm Voltaj: 220