

## EO GAZ NÖTRALİZATÖR



### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

#### ÜRÜN KODU: ZEISS NTR

ZEISS Nötrleştirici Etilen Oksit gazını yüksek etkili nötrleştirme etkisi ile Etilen Glikole çevirerek çevreye zararsız hale getirir.

### NÖTRALİZER KULLANIM TALİMATLARI

- Nötrleştirici tekerleklerini sabitleyin.
- Nötrleştirici asit deposunu, asit seviyesi gösterge borusunun yan tarafındaki işaretli yere kadar asitle doldurun.
- Nötrleştirici su deposunu, su seviyesi gösterge borusunun yan tarafında işaretli yere kadar suyla doldurun.
- Minimum asit ve su seviyeleri, nötrleştirici asit ve su seviyesi gösterge boruları yanda gösterilmektedir. Asit veya su minimum seviyeye geldiğinde yeniden doldurulmalıdır.
- Su haznesini 3-6 ayda bir tamamen boşaltın ve yeniden doldurun. Su tahliye vanası, su seviyesi gösterge hortumunun alt kısmında bulunan vanadır.
- Su haznesini doldurmak için su seviyesi gösterge borusunun üzerindeki hortumu musluğa bağlayın ve depoyu doldurun.